

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## SWASH<sup>®</sup> CLEANSING WIPES 48er- & 24er-Packung

Produkt-Nummer: L05012-48 (UDI-DI: 08717127938216) / M05012-48 (UDI-DI: 08717127938223) /  
M05012-24 (UDI-DI: 08720663610485)


**Benutzer:** Professionelle Anwender oder Gesundheitsdienstleister

### Verwendungszweck:

Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes sind für die Inkontinenzreinigung von inkontinenten und/oder bettlägerigen Patienten zur Infektionsprävention vorgesehen.

### Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- Inkontinenzprodukte (falls erforderlich)
- Saubere Kleidung und/oder Bettwäsche (falls erforderlich)

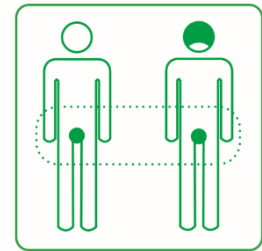

### Gebrauchsanweisung:

Reinigen Sie den verschmutzten Bereich mit einer ausreichenden Anzahl von Feuchttüchern. Verwenden Sie das wiederverschließbare Etikett, um die Verpackung nach jedem Gebrauch zu verschließen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tücher nicht austrocknen. Jede Packung darf nur für eine Person verwendet werden. Eine detaillierte Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.

### Detaillierte Vorgehensweise:

Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes können zentral auf der Station oder neben dem Bett des Pflegebedürftigen gelagert.

- 1 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 2 Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 3 Bringen Sie den Pflegebedürftigen in Rückenlage und legen Sie ein Kissen unter seinen/ihren Kopf. Lassen Sie den Pflegebedürftigen die Oberbekleidung ausziehen. Helfen Sie dem Pflegebedürftigen bei Bedarf. Berücksichtigen Sie die Privatsphäre des Pflegebedürftigen.
- 4 Entfernen Sie nasse und schmutzige Inkontinenzmaterialien.
- 5 Öffnen Sie die Packung mit den Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes und entnehmen Sie ein Tuch. Waschen Sie die Genitalien mit einem Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipe. Verwenden Sie so viele Tücher wie nötig. Die Haut trocknet von selbst durch die Verdunstung der Lotion. Falls erforderlich, trocknen Sie die Hautfalten durch Abtupfen mit einem weichen Papier.
- 6 Bitten Sie den Pflegebedürftigen sich auf die Seite zu drehen und bieten Sie nötigenfalls Hilfe an. Reinigen Sie den verschmutzten Dammbereich (Gesäß und Steißbein) des Pflegebedürftigen mit einem Swash<sup>®</sup> Tuch. Verwenden Sie so viele Tücher wie nötig, um alle Fäkalien und / oder Urin von der Haut zu entfernen. Legen Sie die gebrauchten Swash<sup>®</sup> Tücher vorzugsweise in das Inkontinenzmaterial.
- 7 Untersuchen Sie die Dammregion auf Inkontinenz-assoziierte Dermatitis und andere Hautzustandsvariablen.
- 8 Wenn beim Pflegebedürftigen das Risiko besteht, eine Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) zu bekommen, oder wenn die IAD behandelt werden muss, fahren Sie mit den Gebrauchsanweisungen „Swash<sup>®</sup> Perineum Gloves“/„Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes“ oder „Swash<sup>®</sup> Perineum+ Wipes“ fort.
- 9 Geben Sie dem Pflegebedürftigen neues, sauberes und trockenes Inkontinenzmaterial. Wechseln Sie die Bettwäsche, wenn sie nass oder verschmutzt ist, kleiden Sie den Pflegebedürftigen neu an

- und bringen Sie sie in die gewünschte Position.
- 10 Werfen Sie die leere Verpackung Swash® und die Tücher in den Abfalleimer. Achtung: Die Tücher dürfen NIEMALS IN DER TOILETTE entsorgt werden!
  - 11 Berichten Sie über alle Veränderungen des Hautzustandes nach dem Waschen des Dammes.
  - 12 Wiederholen Sie diesen Vorgang nach jeder Urin- oder Stuhlinkontinenz-Episode.

#### ACHTUNG:


- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Schamgefühle des Pflegebedürftigen.
- Jede Packung darf nur für **eine** Person verwendet werden. Die übrigen Waschtücher können für denselben Pflegebedürftigen verwendet werden.
- Nur für die äußere Anwendung vorgesehen.
- **Entsorgen Sie die Tücher nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschtücher im Abfalleimer.**

#### GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden



## PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gerauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in diesen Anweisungen gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Cleansing Wipes für das Waschen von bettlägerigen Pflegebedürftigen. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.