

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## SWASH<sup>®</sup> SHAMPOO CAP

Produkt-Nummer: Do4077-1 (UDI-DI: o8717127937219) / Go4077-1 (UDI-DI: o8717127937929)

**Benutzer:** Professionelle Anwender oder Gesundheitsdienstleister

### Verwendungszweck:

Swash<sup>®</sup> Shampoo Cap ist für die komplette Haarwäsche bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.

### Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- Handtuch
- Feiner Kamm
- Mikrowelle (falls erforderlich)

### Gebrauchsanweisung:

Testen Sie die Temperatur vor dem Gebrauch. Stülpen Sie die Haube über den Kopf der pflegebedürftigen Person und stellen Sie sicher, dass die Haube das Haar des Pflegebedürftigen vollständig bedeckt. Massieren Sie das Haar 2 bis 3 Minuten lang durch die Shampoo-Kappe, bis das Haar des Pflegebedürftigen vollständig mit Shampoo gesättigt ist. Nehmen Sie die Haube ab, eine Spülung ist nicht erforderlich. Trocknen Sie das Haar des Pflegebedürftigen und stylen Sie es wie gewohnt.

### Detaillierte Vorgehensweise:

Swash<sup>®</sup> Shampoo Cap kann zentral oder neben dem Bett der pflegebedürftigen Person aufbewahrt werden. Sie kann aufgewärmt oder bei Raumtemperatur verwendet werden.

- 1 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 2 Erwärmen Sie die Swash<sup>®</sup> Shampoo Cap auf die gewünschte Temperatur. Die empfohlene Temperatur erreichen Sie, indem Sie die Verpackung auf maximal 800 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
- 3 Waschen Sie sich vorher die Hände und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 4 Bringen Sie die pflegebedürftige Person möglichst in eine bequeme Sitzposition.
- 5 Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Temperatur der Haube. Achtung: die Einweghandschuhe verringern Ihr Wärmeempfinden.
- 6 Entfernen Sie gegebenenfalls zuerst große Mengen an Blut, Gel oder Schmutz und setzen Sie der Person dann die Haube auf den Kopf. Achten Sie bei langen Haaren darauf, dass sich alle Haare oben auf dem Kopf befinden, bevor Sie die Haube aufsetzen.
- 7 Stellen Sie sicher, dass sich alle Haare in der Haube befinden. Massieren Sie sanft das Haar in der Haube 2-3 Minuten lang, damit das Shampoo von den Haaren aufgenommen wird.
- 8 Die Dauer der Massage hängt von der Länge und dem Volumen der Haare ab.
- 9 Nehmen Sie die Haube ab, trocknen Sie das Haar gut mit einem Handtuch und kämmen Sie es mit einem feinen Kamm. Bringen Sie dann die Haare wie gewohnt in Form, falls es notwendig ist.
- 10 Entsorgen Sie die leere Swash<sup>®</sup>-Verpackung zusammen mit den Einweghandschuhen im Abfalleimer. Achtung: Die Haube darf NIEMALS in der Toilette entsorgt werden!
- 11 Vor dem Ausgeben der Tücher ist es wichtig, dass das Pflegepersonal eine ordnungsgemäße Handhygiene durchführt. Dadurch wird verhindert, dass die Packung kontaminiert wird.
- 12 Berichten Sie über alle Veränderungen, falls notwendig.

### ACHTUNG:

- Achten Sie immer auf die Bedürfnisse und Gefühle der pflegebedürftigen Person.
- Jedes Paket darf nur für **eine** Person genutzt werden.
- Nur für die äußere Anwendung bestimmt.
- Wenn die Swash® Shampoo Cap gemäß den Anweisungen auf der Verpackung erwärmt wird, muss die Temperatur der Haube geprüft werden, bevor sie auf der Haut angewendet wird. • Wenn die Swash® Shampoo Cap zu heiß ist, darf sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass die getragenen Einweghandschuhe das Wärmeempfinden verringern. Achten Sie besonders auf die Kontrolle der Temperatur bei Kindern, Personen, die nicht reagieren können oder Personen mit empfindlicher Haut.
- **Entsorgen Sie die Haube nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Haube im Abfalleimer.**

### GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden



## PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gerauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in diesen Anweisungen gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Shampoo Cap für das Waschen von bettlägerigen Pflegebedürftigen. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.